

APPLICAZIONE DELLA CUFFIA

- Assicurarsi che il moncone sia ben asciutto.
- Capovolgere la cuffia e farla ben aderire alla superficie dell'apice del moncone.
- Srotolarla lentamente verso l'alto, evitando che in questa fase si formino bolle d'aria.
- La lozione SL108 facilita l'inserimento della cuffia e forma una barriera protettiva.
- Evitare l'uso di lubrificanti a base di petrolio o di sostanze oleose.
- Si consiglia di non utilizzare il talco.
- In caso di utilizzo di cuffie con ancoraggio distale (con perno), verificare il corretto allineamento del perno stesso.



IGIENE DEL MONCONE

- Il Gel di stirene usato per le cuffie **ALPS** è **IPOALLERGENICO**.
- Lavare quotidianamente il moncone utilizzando acqua tiepida ed un detergente neutro (come il PD595), particolarmente indicato per pelli sensibili.
- Dopo il lavaggio sciacquare abbondantemente la superficie del moncone per eliminare i residui di detergente, possibili cause di arrossamenti e irritazioni.
- Asciugare con un panno pulito.
- Si consiglia di eseguire queste operazioni di pulizia tutte le sere per consentire al moncone di asciugarsi completamente. Nel caso in cui la pulizia venisse effettuata al mattino, assicurarsi che il moncone sia ben asciutto prima di indossare la protesi.




IGIENE DELLA CUFFIA / GINOCCHIERA

- Non utilizzare saponi a base oleosa.
 - Lavare quotidianamente la superficie interna con acqua tiepida ed un detergente neutro (PD595).
 - Dopo il lavaggio sciacquare abbondantemente.
 - Per il lavaggio del tessuto esterno lavare a mano o in lavatrice a bassa temperatura con PD595.
 - Settimanalmente: Versare una piccola quantità di alcool su un panno morbido e pulito. Pulire a fondo la cuffia con il panno; asciugare accuratamente con una salvietta.
- Non immergere** la cuffia nell'alcool.



CONSERVAZIONE DELLA CUFFIA / GINOCCHIERA

- **Non mettere** la cuffia/ginocchiera ad asciugare sul termosifone o su altre fonti di calore diretto.
- Quando non utilizzata, è necessario lasciare appoggiata la cuffia/ginocchiera con l'imbottitura in spugna al suo interno: lasciarla giacere piatta per lunghi periodi può determinare la formazione di pieghe.
- Non lasciare mai la cuffia/ginocchiera semirovesciata.
- Quando non si utilizza la protesi, è bene separare la ginocchiera dall'invasatura.

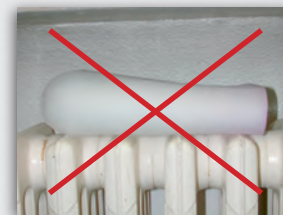

CONSIGLI PER SALVAGUARDARE L'INTEGRITA' DEL PRODOTTO

- Il gel si delamina a contatto con sostanze oleose. Se il paziente usa delle creme abbronzanti o altri tipi di creme contenenti sostanze oleose, il moncone deve essere lavato con un detergente neutro e sciacquato abbondantemente prima di indossare nuovamente la cuffia.
- Si raccomanda l'uso di lozioni ALPS specifiche per il prodotto. Nel caso fosse necessario l'uso di altre pomate, queste si devono applicare nel periodo di non utilizzo della protesi. Lavare e sciacquare abbondantemente il moncone prima di indossare nuovamente la cuffia.

SUDORAZIONE E PELLI GRASSE: SUDORAZIONE

- Durante le prime 2-6 settimane di utilizzo della cuffia è possibile un accentuarsi della sudorazione. Questo effetto sparirà gradualmente.
- In caso di sudorazione particolarmente intensa, limitare il numero di ore consecutive di utilizzo della protesi nella fase iniziale. Aumentare gradualmente il tempo di utilizzo per consentire alla pelle di abituarci.
- In caso di gravi patologie (es. diabete) è raccomandato l'uso di un coprimoncone in cotone o coolmax ALPS che assorba l'umidità in eccesso.
- Può essere utilizzata una lozione antitraspirante specifica per protesi (ALPS ATP008). Se utilizzata in combinazione con SL108, prima applicare ATP008 poi SL108.

PELLI GRASSE

- Per eliminare parte del grasso cutaneo, lavare quotidianamente la superficie interna della cuffia con un detergente neutro come il PD595.
- Eventualmente passare un panno pulito imbevuto di alcool sulla superficie interna della cuffia ed asciugare bene con una salvietta pulita.

LOZIONI ALPS

PD595 DETERGENTE PROTESICO. Confezione da 472 ml

E' un detergente non alcalino che non contiene sapone e può essere usato sia per il lavaggio a mano che per quello in lavatrice delle cuffie e delle ginocchiere di sospensione. Inoltre i pazienti con pelli sensibili potranno trovare questo prodotto lenitivo, ideale per lavare aree di pelle che sono a contatto con la protesi.



SL108 LOZIONE PER LA PELLE.

SL108 è una lozione che fornisce alla pelle una barriera di protezione pur lasciandola respirare. Facilita l'inserimento della cuffia.



Alps South LLC Filiale Italiana
Centergross, Blocco 3A, Gall. A 85
I-40050 Funo di Argelato (BO)
Tel: +39 051-86 06 42
Fax: +39 051-86 59 668
www.alpsitaly.com



"Making Lives Better"

**ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE
CURA E IGIENE DEL MONCONE,
UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE CUFFIE
E DELLE GINOCCHIERE ALPS**

